

דף הסבר איסוף דגימות צואה

הוראות כלליות


- במידה וסבלת מקלקול קיבה בזמן לקיחת הדגימה אנא הימנע/י מלקיחתה וצור/צרי קשר עם צוות המחקר.
- על מנת להימנע מזיהום של הצואה על ידי שתן, מים, או נוזל ניקוי (כגון סבון אסלה), דבר החיוני לניתוח נכון של הדגימה, יש להשתמש ב-FecesCatcher (ראה/י הנחיות שימוש בהמשך).
- את דגימת הצואה רצוי לקחת עד שלושה ימים לפני איסוף המעטפה (הדגימה עמידה מספר שבועות בטמפרטורת חדר).
- במידה והשליח לא הגיע במועד שנקבע, יש לשמור את המבחנה ולתאם איסוף חדש דרך התמיכה או דרך חברת השליחויות.

הכנות חשובות

- יש לרוקן את שלפוחית השתן לפני תחילת איסוף דגימת הצואה.
- דגימת הצואה שתיאסף חייבת להיות נקייה משתן, או ממי האסלה.

לאחר מכן

- פותחים את הפקק הסגול בלבד - אין לפתוח את הפקק הצהוב.
- במבחנה יש נוזל שימור, חשוב לא לשפוך אותו.
- באמצעות הכפית לוקחים דגימה בגודל של אפונה ומניחים בשקע הצהוב על האיקס, אין להכניס את הדגימה פנימה, אלא רק להניח מעל.
- לאחר שסוגרים את הפקק הסגול מנערים במשך דקה, והנוזל מכניס את הדגימה לתוך המבחנה.
- את המבחנה מחזירים לשקית הייעודית במעטפה הלבנה, אין צורך לשמור בקירור.
- דרך האפליקציה, מתעדים את תאריך לקיחת הדגימה: דף ראשי / כפתור + / בדיקת צואה.

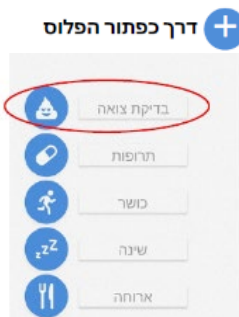


הוראות שימוש ב-FecesCatcher

ה-FecesCatcher היא יריעת נייר עם שתי רצועות דביקות. הדבקת שתי הרצועות על מושב האסלה הופכת את איסוף הצואה לקלה ונוחה.



1. פתח/י את יריעת הנייר בזהירות לפי כיוון החיצים.
2. הדבק/י את היריעה בחלקו האחורי של מושב האסלה, כפי שמופיע בתמונה.
3. הימנע/י ממגע מים ביריעה.

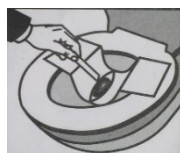

4. לאחר עשיית הצואה על היריעה, השתמש/י במקל שבערכת הצואה שברשותך על מנת לקחת דגימה. כפי שמופיע בתמונה.



5. לאחר לקיחת הדגימה, שחרר/י את היריעה על ידי שחרור הרצועות הדבוקות למושב האסלה והצמדת הרצועות אחת לשניה. כפי שמופיע בתמונה.
6. השלך/י את היריעה לאסלה והמתן/י כדקה עד שהנייר ייספג במים ויתרכך על מנת שיוכל לרדת בקלות בשירותים.

הוראות שימוש

קרא את כל ההוראות לפני האיסוף

הליך האיסוף:

- השתמש בחיתול המסופק לצרכי איסוף.
- כתבו שעה ותאריך בה נעשתה הדגימה על המבחנה.
- הוצא את כוס הפלסטיק מהציודנית
- רוקן את שלפוחית השתן לפני תחילת האיסוף.
- דגימת הצואה שתאיסוף חייבת להיות נקייה משתן או ממי האסלה.
- ייתכן שיהיה צורך בנייר טואלט או בטישור.

הכנה

1 הנח את המבחנה בכוס לשם ייצובה. כתוב שעה ותאריך בה נעשתה הדגימה על המבחנה. הברג החיצה רק את המכסה הסגול, והנח אותו בצד לשימוש מאוחר יותר.



2 השתמש במקלון לצורך איסוף כמות קטנה של דגימת צואה.



הגודל האמיתי של דגימת הצואה.



3 העבר את דגימת הצואה לתוך החלק העליון הצהוב של המבחנה. חזור על הפעולה עד שהדגימה תגיע לקצה העליון ותמלא אותו לגמרי.



חשוב: אל תדחוף את הדגימה לתוך המבחנה.

4 העבר את המקלון אופקית על פני הקצה העליון של המבחנה כדי לשטח את הדגימה ולהסיר כל שאריות. השלך את המקלון לאשפה.



5 הברג את המכסה הסגול בחזרה לחלק העליון הצהוב והדק אותו היטב.




6 נער את המבחנה הסגורה קדימה ואחורה חזק ומהר ככל האפשר למשך 30 שניות לכל הפחות.



7 דגימת הצואה תתערבב במבחנה עם נוזל הייצוב; לא כל החלקיקים יתמוססו.


חשוב: המשך לנער אם עדיין נותרו חלקיקים גדולים, כפי שמוצג בתרשים A.

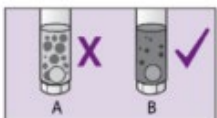

omnigene[®]-GUT

עבור מיקרוביום

REF OMR-200

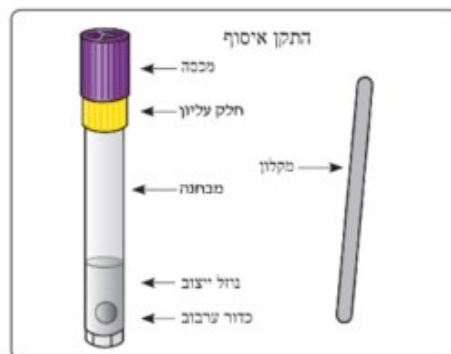

תמצית המידע על הערכה:

OMNigene-GUT מספק את החומרים וההוראות לאיסוף ולייצוב דג"א מיקרוביאלי מתוך דגימת צואה.

אזהרות ואמצעי זהירות:

- לשימוש חיצוני בלבד.
- אל תסיר את החלק העליון הצהוב מהמבחנה.
- אל תאפשר לנוזל הייצוב במבחנה להישפך החוצה.
- אם הנוזל בא במגע עם העיניים או העור, שטוף אותו במים. אין לבלוע את הנוזל.
- אם דגימת הצואה היא נוזלית, או אם יש לתורם הדגימה שלשול, יש להמתין עד ליציאה הבאה לצורך איסוף דגימה.
- עצמים קטנים עלולים לגרום לסכנת חנק.

מקרא התוויות:

יש לאסוף את הדגימה עד (לשימוש עד)
מספר קטלוגי
יצרן
הוראות אחסון
אזהרה, יש לקרוא את ההוראות השימוש

